

informativo

Deflex

Introdução

- Sistema de prótese removível flexível termo-injetado com material semi-rígido, oferecendo características estéticas e funcionais.

Indicações

- Atualmente as próteses Deflex estão se integrando como uma alternativa ao acrílico e cromo-cobalto, sendo a melhor opção para quem busca estética sem abrir mão da funcionalidade, indicado para casos temporários, como, espera da ossointegração em cirurgia de implantes e durante tratamento de reabilitação complexa, recomendado o tempo de uso máximo de 01 ano.

Planejamento

- O grampo estético se localiza abaixo da linha equatorial do dente (área retentiva). Caso necessário, para garantir a funcionalidade dos grampos, pode se criar retenções em resina nos dentes. Os nichos de apoio oclusal, caso necessário, deverão ser feitos em formato de "V", mais profundo que os convencionais.

Modelagem

- Realizar uma moldagem nítida, imprimindo área de papilas até fundo de saco com silicone leve e pesado ou alginato (nesse caso verter imediatamente com gesso especial), moldar antagonista e realizar registro de oclusão.

Higienização das Próteses Deflex

- Para não haver abrasão na Prótese Deflex é recomendado higienização com 01 parte de hipoclorito de sódio para 09 partes de água ou detergente neutro, garantindo sua conservação por maior tempo possível.

